



Lanceta de Segurança

DESCRIÇÃO

As lancetas de segurança são confeccionadas em ABS na base e tampa, a agulha é em aço cirurgico inoxidável 304 com a ponta tri facetada e afiada. Possui espessura ultrafina para punção indolor, tem um mecanismo de segurança que dispara a agulha e recolhe automaticamente após a punção. Acionada por contato. Tem uma penetração consistente e descarte seguro. Estéril e de uso único. Em conformidade com a NR32.

PRODUTO

TAMANHO	COR	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	DIAMETRO
18G	VERDE	18.1-18.2MM	1.8MM	1.00MM
21G	CINZA	18.1-18.2MM	1.8MM	0.80MM
21G	MARFIM	18.1-18.2MM	2.2MM	0.80MM
23G	LARANJA	18.1-18.2MM	1.8MM	0.60MM
26G	ROXO	18.1-18.2MM	1.8MM	0.45MM
28G	AZUL	18.1-18.2MM	1.8MM	0.36MM
30G	AMARELO	18.1-18.2MM	1.8MM	0.32MM



Cadastro Anvisa: 81671040003
Fabricante: Suzhou Kyuan Medical Apparatus Co., Ltd

INDICAÇÃO

Indicado para obtenção de amostra de sangue capilar, inclusive para teste de glicemia capilar.



INSTRUÇÃO DE USO

Escolha o calibre da lanceta de segurança de acordo com o tipo de pele, realizar assepsia do local onde será feito punção. Segure e gire a tampa protetora da lanceta de segurança e puxe cuidadosamente removendo-a. Posicionar sobre o local onde será feita a coleta. Pressionar a lanceta contra a pele e solte rapidamente, coletar a amostra de sangue para o teste e descartar a Lanceta de Segurança em um coletor de resíduos perfurocortantes apropriado.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizada através de tratamento por radiação gama.

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em sua embalagem original.
Armazenar em local seco, limpo e livre de raios solares e vapores químicos.
Armazenar em temperatura adequada.

PRECAUÇÃO, ADVERTÊNCIA E EFEITO

Não permite reutilização.
Não utilize caso a embalagem esteja danificada ou tenha expirado o prazo de validade.
Utilizar técnicas de assépticas antes do procedimento. Descartar em locais apropriados, conforme a legislação vigente da vigilância sanitária local.
Atentar aos pacientes que possuam distúrbios de coagulação.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

MODELO	QTDD CARTUCHO	QTDD CAIXA MASTER
21G	100 unidades	4000 unidades
23G	100 unidades	4000 unidades
26G	100 unidades	4000 unidades
28G	100 unidades	4000 unidades
30G	100 unidades	4000 unidades

VALIDADE

5 anos após fabricação.