



Lanceta Simples

DESCRIÇÃO

As lancetas são confeccionadas em ABS na base e tampa, a agulha é em aço cirúrgico inoxidável 304 com a ponta tri facetada e afiada. Possui espessura ultrafina para punção indolor, uma penetração consistente.

Estéril e de uso único. Formato universal, adaptando-se a grande maioria dos lancetadores do mercado.

PRODUTO

AGULHA				CORPO BASE		
	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	COR
21G	0.80MM	23.5MM	3.25MM	3.2CM	0.5CM	AMARELO
23G	0.60MM	23.5MM	3.25MM	3.2CM	0.5CM	AZUL C.
26G	0.45MM	23.5MM	3.25MM	3.2CM	0.5CM	ROSA
28G	0.36MM	23.5MM	3.25MM	3.2CM	0.5CM	AZUL
30G	0.32MM	23.5MM	3.25MM	3.2CM	0.5CM	ROXO
32G	0.25MM	23.5MM	3.25MM	3.2CM	0.5CM	MARFIN
33G	0.24MM	23.5MM	3.25MM	3.2CM	0.5CM	VERDE

** Profundidade da agulha de 0.05mm a 3.25mm de acordo com o ajuste do lancetador**



Cadastro Anvisa: 81671040001

Fabricante: Suzhou Kyuan Medical Apparatus Co., Ltd



INDICAÇÃO

Indicado para obtenção de amostra de sangue capilar, inclusive para teste de glicemia capilar.

INSTRUÇÃO DE USO

Escolha o calibre da lanceta de acordo com o tipo de pele do usuário. Abra a caneta lancetadora, encaixe a lanceta, retire a proteção da agulha girando e puxando até expor a ponta da agulha. Guarde o lacre para descartar a lanceta. Tampar o lancetador, regule a profundidade da punção, armar e puncionar. Após o teste, retire a lanceta usada, proteja a ponta da Lanceta com o lacre de proteção e descarte-a em local apropriado para materiais perfurocortantes.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizada através de tratamento por radiação gama.

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em sua embalagem original.
Armazenar em local seco, limpo e livre de raios solares e vapores químicos.
Armazenar em temperatura adequada.

PRECAUÇÃO, ADVERTÊNCIA E EFEITO

Não permite reutilização. Não utilize caso a embalagem esteja danificada ou tenha expirado o prazo de validade.
Utilizar técnicas de assépticas antes do procedimento. Descartar em locais apropriados, conforme a legislação vigente da vigilância sanitária local.
Atentar aos pacientes que possuam distúrbios de coagulação.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

MODELO	QTDD CARTUCHO	QTDD CAIXA MASTER
28G	100 unidades	10.000 unidades

VALIDADE

5 anos após fabricação.