

GUIA DE UTILIZAÇÃO

MONITOR ACCU-CHEK® ACTIVE



AUTOCODIFICADO



Autocodificado

1



Não há a necessidade de chip de codificação.

Ligando o monitor


1



Deslize a tira de teste suavemente na direção das setas.

Dosagem com a tira fora do monitor

2

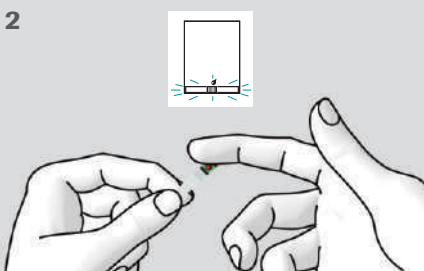

Quando o símbolo da gota piscar no display, remova a tira do monitor. Aplique a gota de sangue no centro da área verde e reinsira a tira no monitor, dentro de no máximo 20 segundos.

Finalizando o teste

3



O monitor desliga automaticamente ao remover a tira de teste.

Marcando os resultados (Função para uso individual do monitor)

1



Enquanto o resultado do teste é exibido, pressione **M** ou **S** até selecionar o marcador desejado.

2


- Antes das refeições
- Alarme para depois das refeições
- Depois das refeições
- Marcador asterisco
- Solução Controle

Marcadores são exibidos nesta ordem ao pressionar o botão **S**.

Resgatando médias de resultados



Com o monitor desligado, pressione **M** brevemente e o último resultado é exibido.

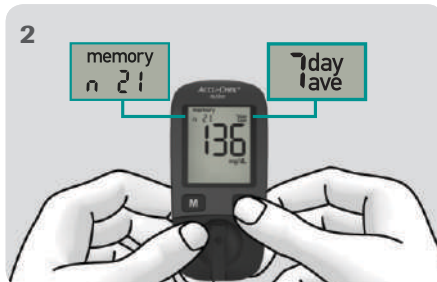

Pressione o botão **S** brevemente. A primeira média, a média de 7 dias é exibida. Pressione o botão **S** novamente para navegar pelas médias seguintes.



Pressione os botões **M** e **S** ao mesmo tempo para desligar o monitor.

Transferindo resultados de glicemia para o computador



Certifique-se que você tem um software de gerenciamento de diabetes Accu-Chek® no seu computador. Com o monitor desligado, conecte o cabo Micro USB no monitor.



Assim que a conexão com o computador for estabelecida, o monitor transfere todos os testes salvos na memória. Durante a transferência, **PC** é exibido no display



Para desligar o monitor, desconecte o cabo USB do monitor de glicemia.



Referências

1. Freckmann G, Schmid C, Baumstark A, Pleus S, Link M, Haug C. System accuracy evaluation of 43 blood glucose monitoring systems for self-monitoring of blood glucose according to DIN EN ISO 15197. J Diabetes Sci Technol. 2012;6(5):1060-1075.
2. Data on file. ISO 15197:2013, in vitro diagnostic test systems requirements for blood glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus include tighter requirements for accuracy and new criteria for hematocrit and other interferences.

ACCU-CHEK e ACCU-CHEK ACTIVE são marcas da Roche. ©2020 Roche Diabetes Care.
Reg. ANVISA 81414021688, 81414020030 e 81414020032. Cód. BR-2133 - Setembro 2020.

Roche Diabetes Care Brasil Ltda.

0800 77 20 126 | www.accu-chek.com.br | brasil.accuchekresponde@roche.com
Av. Engenheiro Billings, 1729 - prédio 38 - térreo - São Paulo - SP - Brasil